


Quick guide LoFric Elle katetre

Skann for
detaljerte
instruksjoner

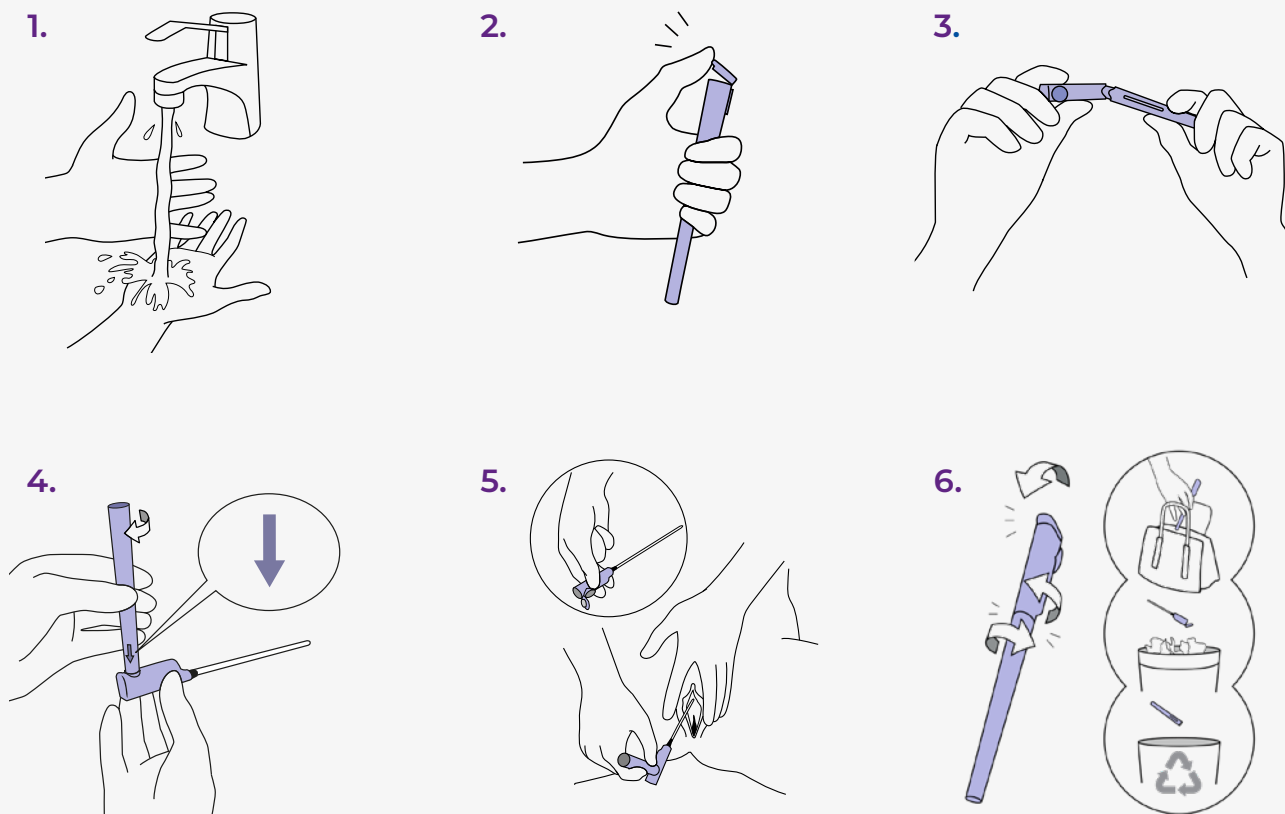

1. Vask hendene grundig med såpe og vann.
2. Åpne det øvre lokket.
3. Hold kateteret og bøy forsiktig den øvre delen for å åpne det. Trekk kateteret ut.
4. VALGMULIGHET: Kateteret kan brukes med eller uten håndtak. Håndtaket gir økt rekkevidde og en mer hygienisk kateterisering. Koble etuiet til kateteret med et enkelt klikk, og pass på at pilen på etuiet peker nedover.
5. Vipp bekkenet fremover, spre kjønnsleppene, trekk forsiktig oppover, urinrøret ligger rett over vaginalåpningen.

Før kateteret sakte inn i urinrørsåpningen med den andre hånden, til urinen begynner å renne, før inn litt mer for å sikre at begge øyer er inne i blæren.

Når urinstrømmen avtar til drypp, trekker du kateteret langsomt ut. Hvis urinen begynner å renne igjen, stopper du tilbaketrekkingprosessen og venter til urinstrømmen stopper for å sikre at blæren tømmes fullstendig.

6. Sett kateteret tilbake i beholderen. Kast det, eller bær det i vesken til det skal kastes. Vær oppmerksom på dette! Den nedre beholderen er resirkulerbar.

Viktig Informasjon

LoFric[®] Elle[™], hydrofilt tappekaterer med saltløsning til aktivering, til engangs bruk.

For voksne kvinner, ungdom og barn.

For kort- og langsiktig behandling med intermitterende kateterisering.

LoFric katetre fås kun på resept.

Sørg for å følge råd og opplæring i kateteriseringsprosedyren gitt av helsepersonell, før bruk.

Se bruksanvisningen som følger med i pakken, for viktig informasjon og fullstendige instruksjoner.

Ta kontakt med forskriveren hvis du opplever problemer.

I Wellspect utvikler vi innovative løsninger innenfor kontinenspleie som kan være med på å endre menneskers liv. Vi hjelper våre brukere til en bedre selvfølelse og mer uavhengighet, i tillegg til god helse og velvære. Vi har vært ledende i bransjen i over 40 år med varemerkene LoFric[®] og Navina[™]. Vi har som mål å minimere miljøpåvirkningen av produktene våre og streber lidenskapelig etter å bli klimanøytrale. Vi jobber sammen med brukere og helsepersonell for bedre klinisk resultat på en bærekraftig måte, nå og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For mer informasjon om våre produkter og tjenester, vennligst besøk [Wellspect.no](https://wellspect.no).

Bli med oss på LinkedIn, X, Facebook og Instagram.

wellspect.no

Wellspect AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway. Phone: +47 815 59 118.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

R_x Only