
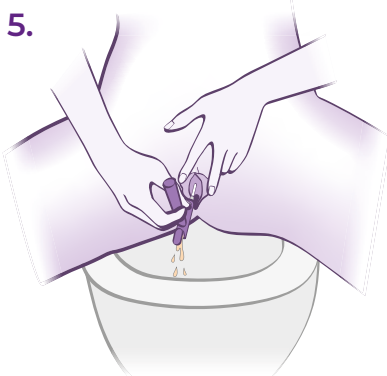
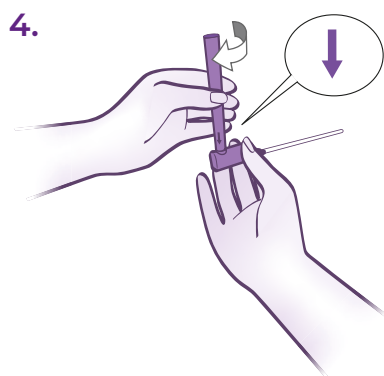


LoFric Elle Pro kateter – quick guide

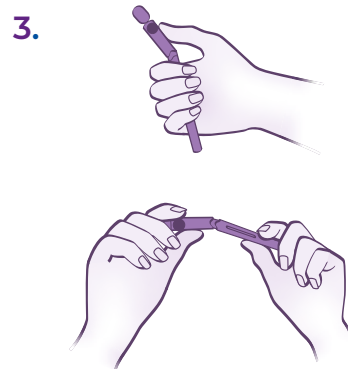

1. Vask hendene grundig med såpe og vann.
2. Åpne det øvre lokket.
3. Hold kateteret i hånden, bøy den øverste delen forsiktig for å åpne. Dra ut kateteret
4. Koble beholderen til kateteret ved å vri forsiktig, sørg for at pilen på kateteret peker nedover.
5. Tilt bekkenet oppover, spre kjønnsleppene, dra litt oppover for å lokalisere urinrørsåpningen. Urinrørsåpningen befinner seg rett over vaginalåpningen. Bruk den andre hånden til å føre kateteret sakte inn i urinrørsåpningen helt til

de begynner å rene urin. Før kateteret inn litt til for å sikre en jevn stråle.

Vent til urinen slutter å renne, trekk da kateteret sakte ut.

6. Sett kateteret tilbake i beholderen. Kast det, eller bær det i vesken til det skal kastes. Vær oppmerksom på dette! Den nedre beholderen er resirkulerbar.

Viktig Informasjon

LoFric® Elle™ Pro, et klart til bruk , hydrofilt engangskateter med multiple kateterøyne, laget for fullstendig blæretømming uten behov for reposisjonering.

For kort- og langsiktig behandling med intermitterende kateterisering.

LoFric katetre fås kun på resept.

Sørg for å følge råd og opplæring i kateteriseringsprosedyren gitt av helsepersonell, før bruk.

Se bruksanvisningen som følger med i pakken, for viktig informasjon og fullstendige instruksjoner.

Ta kontakt med forskriveren hvis du opplever problemer.

I Wellspect utvikler vi innovative løsninger innenfor kontinenspleie som kan være med på å endre menneskers liv. Vi hjelper våre brukere til en bedre selvfølelse og mer uavhengighet, i tillegg til god helse og velvære. Vi har vært ledende i bransjen i over 40 år med varemerkene LoFric® og Navina™. Vi har som mål å minimere miljøpåvirkningen av produktene våre og streber lidenskapelig etter å bli klimanøytrale. Vi jobber sammen med brukere og helsepersonell for bedre klinisk resultat på en bærekraftig måte, nå og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For mer informasjon om våre produkter og tjenester, vennligst besøk [Wellspect.no](https://wellspect.no).
Bli med oss på LinkedIn, X, Facebook og Instagram.

wellspect.no

Wellspect AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway. Phone: +47 815 59 118.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

R_x Only