


LoFric Origo Pro kateter – quick guide

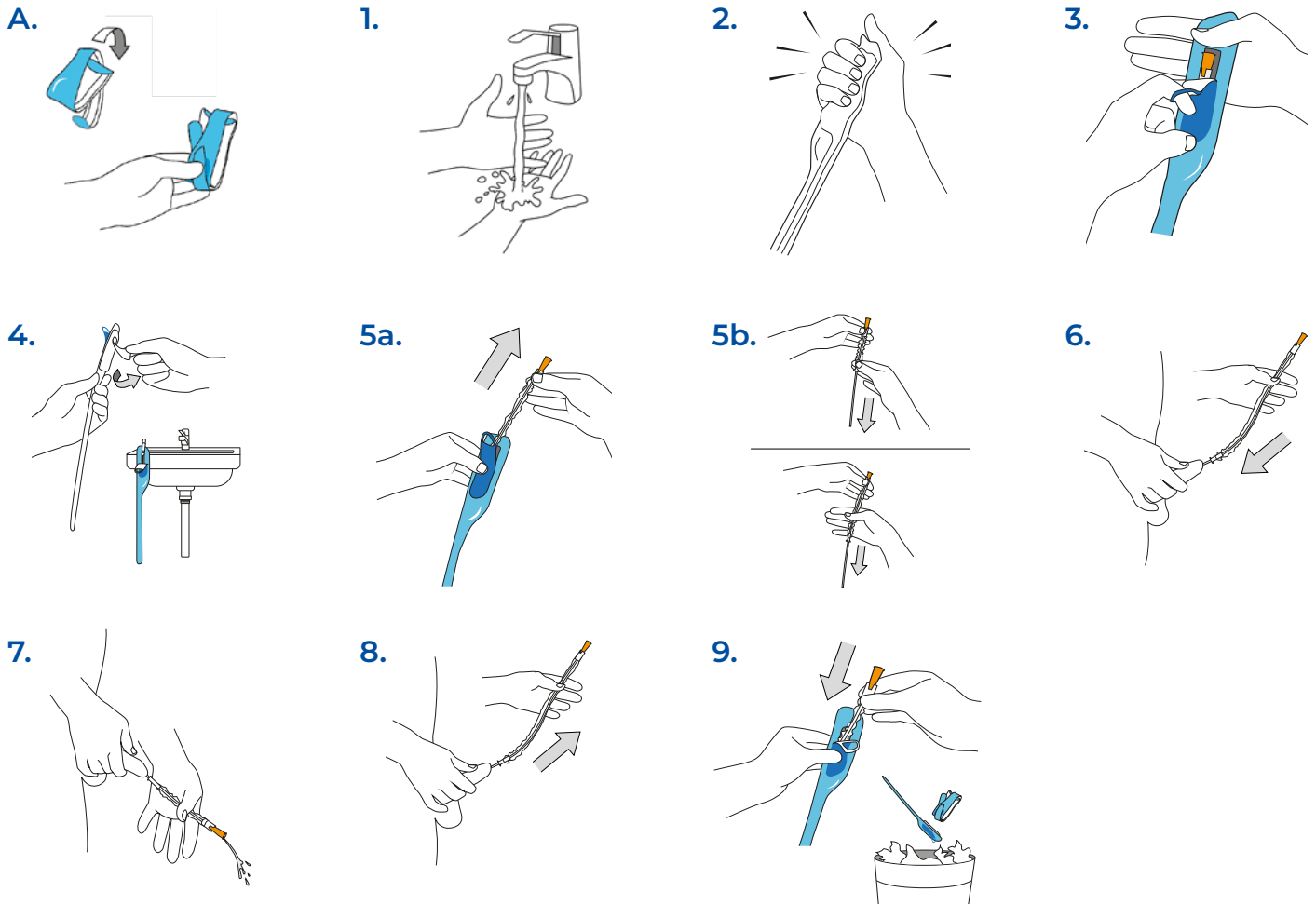

A. Tips til oppbevaring før bruk. Sammenbrettbart til lommestørrelse. Bruk åpningen for å holde katetret sammenbrettet.

1. Vask hendene grundig med såpe og vann.
2. Trykk for å frigjøre saltløsningen, så er katetret klart til bruk.
3. Bruk løkken til å trekke ned og åpne.
4. Valgfritt: Bruk baksiden av teipfiken for å feste produktet på en tørr, ren overflate.
5. A. Etter åpning klemmer du forsiktig og holder i hylsegrepet slik at beskyttelseshylsen trekkes ned automatisk når katetret tas ut. Bruk beskyttelseshylsen til å kontrollere innføringen uten å måtte berøre kateterslangen.
- B. Valgfritt: Ta ut katetret. Trekk hylsegrepet nedover for å dekke kateterslangen. Bruk beskyttelseshylsen til å kontrollere innføringen uten å måtte berøre kateterslangen.

6. Løft penis mot magen for å rette ut urinrøret. Før katetret langsomt inn i urinrøret. Når urinen begynner å renne, fører du kateteret litt lenger inn for å sikre en jevn strøm.
7. Vend penis ned når urinen begynner å renne ut av katetret.
8. Vent til urinstrømmen stopper, for å sikre at blæren tømmes fullstendig. Trekk kateteret sakte ut.
9. Legg katetret tilbake i emballasjen, og kast det på riktig måte (lokale forskrifter kan variere).

Viktig informasjon

Bruk kun den medfølgende saltvanns løsningen til fukting av katetret.

Ikke plasser katetret på papir eller tekstiler, siden disse materialene kan absorbere det våte belegget.

Viktig informasjon

LoFric® Origo™ Pro, Engangskateter med saltvannsløsning for aktivering, og multiple kateterøyne, laget for fullstendig blæretømming uten behov for å reposisjonere.

For kort- og langsiktig blæretømming med intermitterende kateterisering.

For voksne og ungdom.

LoFric katetre er kun for reseptbelagt bruk.

Sørg for å følge råd og opplæring i kateteriseringsprosedyren gitt av helsepersonell, før bruk.

Se bruksanvisningen som følger med i pakken, for viktig informasjon og fullstendige instruksjoner.

Kontakt legen din hvis du opplever problemer.

Hos Wellspect utvikler vi innovative produkter og løsninger som utgjør en reell forskjell for mennesker som trenger kontinenspleie – slik at de kan leve livet fullt ut, hver dag. Vi har vært ledende innen helsevesenet i over 40 år med varemerkene LoFric®, Navina™ og Surity™. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre våre brukervennlige løsninger tilgjengelige for enda flere mennesker, samtidig som vi streber etter å opprettholde de høyeste kvalitetsstandardene. Vi jobber også hele tiden med å minimere vårt karbonavtrykk. Gjennom tett samarbeid med brukere og helsepersonell streber vi etter å forbedre kliniske resultater og forbedre livskvaliteten for mennesker over hele verden.

Wellspect. A Real Difference.

For mer informasjon om våre produkter og tjenester, vennligst besøk wellspect.no

Følg oss på LinkedIn, X, Facebook og Instagram

wellspect.no

Wellspect AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norway. Phone: +47 815 59 118.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

R_x Only